



SOFARGEN® Repair

Δερματολογική γέλη
για τοπική χρήση
Επίθεμα γέλης
με υαλουρονικό οξύ
και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη

Σωληνάριο
25 g

Για τη διευκόλυνση
της επούλωσης
των τραυμάτων

Περιγραφή προϊόντος:

Το **SOFARGEN® Repair** είναι ένα επίθεμα υδατικής βάσης για τοπική χρήση που περιέχει υαλουρονικό οξύ και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη.

Το υαλουρονικό οξύ, χάρη στην ιδιαίτερη υγροσκοπική του δύναμη, σε περίπτωση τραυματισμού του δέρματος βοηθά να διατηρηθεί το μικροπεριβάλλον ευνοϊκό για την αποκατάσταση των βιολογικών ιδιοτήτων του δέρματος όπως η ελαστικότητα και η ενυδάτωση.

Η γέλη με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (πάνω από 95%), διατηρεί ενυδατωμένο το τραύμα ευνοώντας την τη διαδικασία επούλωσης των ιστών και την απομάκρυνση των νεκρωμένων ιστών.

Η παρουσία της αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, μιας μεταλλικής ένωσης που παράγεται από την αντίδραση νιτρικού αργύρου και σουλφαδιαζίνης, αποτρέπει και ελέγχει τη μικροβιακή επιμόλυνση του επιθέματος και διατηρεί το περιβάλλον του τραύματος ελεύθερο από άλλα εξωγενή βακτήρια.

Η ειδική σύνθεση δημιουργεί ένα περιβάλλον διευκολύνει τη φυσική διεργασία της επούλωσης και εμποδίζει αποτελεσματικά τη διείσδυση μικροβίων. Το προϊόν παραμένει εύκολα στη θέση όπου εφαρμόζεται και δεν επηρεάζεται από το τράβηγμα των άκρων του τραύματος. Αφαιρείται εύκολα, πλένοντας το τραύμα με φυσιολογικό ορό.

Σύνθεση:

Κεκαθαρμένο ύδωρ, γλυκερίνη, Carbopol 974P, υδροξείδιο του νατρίου, μικροκονιοποιημένη αργυρούχος σουλφαδιαζίνη, υαλουρονικό νάτριο.

Ενδείξεις:

Το **SOFARGEN® Repair** ενδείκνυται για την τοπική θεραπεία δερματικών βλαβών όπως: εκδορών, κοψιμάτων, πληγών, εγκαυμάτων, επιφανειακών τραυμάτων, ερεθισμών του δέρματος και δερματολογικών παθήσεων εν γένει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει την επούλωση της πληγής, προστατεύοντας την από κίνδυνο μόλυνσης. Η παρουσία της γέλης, ακόμα, διευκολύνει επίσης την απόμακρυνση των μη βιώσιμων τμημάτων ιστών και συσσωρεύσεων ινώδους και εσχάρας.

Δοσολογία και τρόπος χρήσης:

Αφού καθαρίσετε το τραύμα, εφαρμόστε στην επιφάνεια του τραύματος ένα ομοιόμορφο στρώμα πάχους 2 ή 3 mm. Η γέλη μπορεί να εφαρμοστεί είτε απευθείας πάνω στο τραύμα, είτε αφού προηγουμένως απλωθεί σε μια αποστειρωμένη γάζα για να αποκτήσει ενυδατική δράση, ή σε επίθεμα από πολυουρεθάνη ή ημιπερατό επίθεμα ως μέσο καθαρισμού. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να μείνει στη θέση που εφαρμόζεται από 24 έως 72 ώρες. Το **SOFARGEN® Repair** είναι επίσης κατάλληλο υποκατάστατο των ευρύτερα χρησιμοποιούμενων

επιθεμάτων υδρογέλης.

Η εφαρμογή της γέλης πρέπει να εφαρμόζεται συνεχίζεται ανελλιπώς μία ή δύο φορές την ημέρα, όσο εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα μόλυνσης και μέχρι να επέλθει επούλωση, τόσο σε περιπτώσεις φυσικής επούλωσης όσο σε περιπτώσεις χειρουργικής αποκατάστασης. Σε κάθε ανανέωση της εφαρμογής, να καθαρίζετε σχολαστικά το τραύμα με νερό ή φυσιολογικό ορό.

Προφυλάξεις:

Οι ασθενείς με επιβεβαιωμένη υπερευαισθησία στα συστατικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το **SOFARGEN® Repair**. Συνιστάται να μη γίνεται χρήση του προϊόντος για περισσότερο από 4 εβδομάδες. Απευθυνθείτε στον γιατρό αν η επούλωση είναι ατελής ή παρουσιαστούν ανεπιθύμητα συμπτώματα. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, συμβουλευθείτε τον γιατρό.

Προειδοποιήσεις:

Το **SOFARGEN® Repair** μπορεί να αποκτήσει καστανό χρώμα αν εκτεθεί στο φως, λόγω των ιόντων αργύρου που περιέχει. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του προϊόντος. Μην εφαρμόζετε το προϊόν μαζί με υγρά ή στερεά απολυμαντικά. Κλείνεται το σωληνάριο μετά από κάθε εφαρμογή. Οι έγκυες γυναίκες και τα νήπια μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν μόνο κατόπιν συμβουλής γιατρού. Το **SOFARGEN® Repair** πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία μικρών τραυμάτων. Το προϊόν δεν προορίζεται για οφθαλμική χρήση. Μην το καταπίνετε.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΦΘΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες:

Μπορεί να παρουσιαστεί παροδικό αίσθημα καύσου ή ερεθισμού, χωρίς ωστόσο επιπτώσεις, και σπάνιες τοπικές αλλεργικές αντιδράσεις. Αν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες, απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ημερομηνία λήξης και φύλαξη:

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 30 °C. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης ισχύει μόνο για προϊόντα σε συσκευασία που δεν έχει ανοιχτεί και φυλάσσεται σωστά. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 12 μηνών από το πρώτο άνοιγμα.

Ημ/νία τελευταίας αναθεώρησης: Απρίλιος 2024.



Βλέπε ένθετο
συσκευασίας
πριν τη χρήση



Να φυλάσσεται
σε θερμοκρασία
κάτω από 30 °C



Χρήση
μέχρι



Αριθμός
παρτίδας



Κατασκευαστής:
SOFAR S.p.A.

Via Firenze, 40 - 20060 Trezzano Rosa (MI) - Italy

Διανομέας στην Ελλάδα:

Win Medica A.E.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35,

15238 Χαλάνδρι

Τηλ. 210 7488821

www.winmedica.gr

ALFASIGMA